

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice : elle contient des informations importantes pour l'utilisateur.

Ceci est un dispositif médical disponible sans prescription médicale. Toutefois, il doit être utilisé conformément aux indications décrites pour une meilleure efficacité.

- **Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**
- **Si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils, adressez-vous à votre médecin et/ou pharmacien.**
- **Si les symptômes persistent après un certain temps, consultez votre médecin.**

Cicatridine®

ACIDE HYALURONIQUE SEL SODIQUE 5 mg
ovules vaginaux

COMPOSITION

Acide hyaluronique sel sodique, Centella asiatica, Calendula, Aloe vera, Méléaleuca, glycérides semi-synthétiques, BHT.

PRÉSENTATION

CICATRIDINE se présente sous forme d'ovules à usage vaginal. La boîte contient 10 ovules vaginaux de 2 g.

QU'EST-CE QUE CICATRIDINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les ovules vaginaux CICATRIDINE exercent leur activité grâce à la présence d'acide hyaluronique, un mucopolysaccharide abondamment distribuée dans de nombreux tissus corporels. L'acide hyaluronique agit comme soutien structurel, ce qui procure tonicité, trophisme et élasticité aux tissus. De nombreuses études cliniques ont démontré la capacité de l'acide hyaluronique à accélérer et à améliorer le processus d'épithélialisation et de réparation tissulaire.

INDICATIONS

Traitement adjuvant des processus de réparation des états atrophiques et dystrophiques de la muqueuse vaginale. Il favorise la cicatrisation lors du post-partum, en chirurgie gynécologique, dans les cas de dystrophie consécutive à la chimiothérapie, aux radiations ionisantes et à la sécheresse vaginale, également due à une carence en œstrogène.

QUAND CICATRIDINE NE DOIT-IL PAS ÊTRE UTILISÉ ?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

Grossesse et allaitement

Dans ces conditions, il est nécessaire de consulter votre médecin.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des équipements ou des machines


Aucune précaution particulière n'est requise.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

Les interactions avec d'autres produits ne sont pas connues ; il est donc conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser les ovules vaginaux CICATRIDINE en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage vaginal.

COMMENT UTILISER CICATRIDINE ?

Retirer l'ovule de l'emballage en tirant les deux languettes prédécoupées du blister et l'insérer profondément dans le vagin. Il est recommandé de se laver les mains avant et après chaque utilisation de ce dispositif médical.

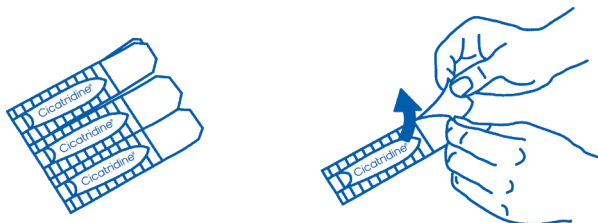

QUAND PRENDRE CICATRIDINE ET COMBIEN DE TEMPS ?

Utiliser un ovule par jour, de préférence le soir avant de se coucher, ou selon la prescription médicale. La durée d'utilisation dépend de l'évolution des symptômes ; le cas échéant, les ovules vaginaux CICATRIDINE peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées.

CICATRIDINE peut être utilisé avec des préservatifs.

EFFETS INDÉSIRABLES

L'utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une sensibilisation. Dans ce cas, il est conseillé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin afin d'entamer un traitement approprié. Si d'autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

MISES EN GARDE

Tenir le produit hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler.

PÉREMPTION, CONSERVATION ET ÉLIMINATION

La date de péremption fait référence au produit dans son emballage fermé et conservé correctement. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption ou si celui-ci est ouvert ou endommagé. Conserver le dispositif médical à l'abri de la lumière et de la chaleur, de préférence à une température entre 4 °C et 25 °C. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demander à votre pharmacien ce qu'il faut faire des dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

DISPOSITIF MÉDICAL  0373

 **Fabricant :**
FARMA-DERMA s.r.l.

Via dei Bersaglieri, 10
40010 Sala Bolognese (BO) ITALIE (ITALY)

Distributeur :
HRA Pharma France

14-16 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris - FRANCE